


# Anleitung

---

zur neuen Theater-Höranlage

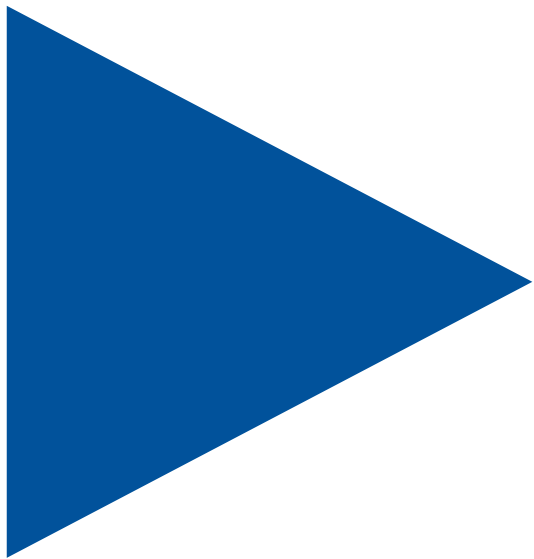

Die **Empfängerausgabe** beim Garderobebesuchen ist mit diesem Piktogramm gekennzeichnet. **FM-Anlage (Funk)**.



Es stehen zwei Empfängertypen zur Verfügung:

- **Kinnbügelempfänger** für Besucher mit einem leichten Hörproblem.
- **Funkuniversalempfänger** für Hörsystemträger.

Die Empfänger werden für die Dauer der Vorstellung **gratis** zur Verfügung gestellt.

## Bedienungsanleitung Kinnbügelempfänger Sennheiser 840-TV



### Hörer einschalten:

Der Hörer schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ihn aufspreizen.



### Hörer aufsetzen:

Setzen Sie den Hörer so auf, dass der Sennheiser-Schriftzug vom Körper weg zeigt. Die Ohrpolster passen sich flexibel der Ohrform an, dies erhöht den Tragekomfort.



### Lautstärke einstellen:

Stellen Sie mit dem Regler für die Lautstärke eine für Sie ausreichende und angenehme Lautstärke ein.

**Vorsicht!** Lautes Hören schädigt das Gehör.



### Sie hören nicht die gewünschte Tonquelle?

Der automatische Suchlauf des Empfängers hat möglicherweise eine andere Tonquelle gefunden. Drücken Sie die Taste Kanalsuche **1** am Hörer so oft, bis Sie die Tonquelle gefunden haben.



### Balance einstellen:

Die Balance regelt die Lautstärkeverteilung zwischen dem rechten und linken Ohr.

Stellen Sie den Regler so ein, dass Sie auf beiden Ohren gleichermassen gut hören.


Drehen Sie den Regler für die Balance **2** mit dem Daumen nach links «**L**» oder rechts «**R**», um die Lautstärke auf dem entsprechenden Ohr zu erhöhen.

## Bedienungsanleitung Universalempfänger Sennheiser 840-S



### Kopfhörer anschliessen:


Verbinden Sie den 3.5mm Minijackstecker des Kopfhörers/Walkmanhörers mit dem Anschluss **1** des Empfängers.

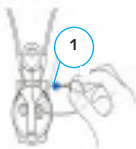

### Induktionshalsschleife oder Verbindungskabel zu Ihrem Hörsystem anschliessen:

An den Anschluss **1** können Sie die Induktions-Halsschleife, Induktionshaken, Induktionsplättchen oder eine Audioschuhverbindung anschliessen.

Über alternative Anschlussmöglichkeiten an Ihr Hörsystem informiert Sie Ihr Hörgeräte-Akustiker.

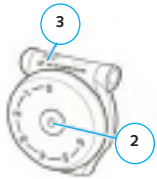

### Empfänger ein-/ausschalten:

Drücken Sie die Taste **2** zum Einschalten solange, bis die Kanalanzeige **3** leuchtet. Die Kanalanzeige **3** erlischt nach 30 Sekunden.



### Lautstärke einstellen:

Stellen Sie mit dem Regler für die Lautstärke eine für Sie ausreichende und angenehme Lautstärke ein.




### Sie hören nicht die gewünschte Tonquelle?

Der automatische Suchlauf des Empfängers hat möglicherweise eine andere Tonquelle gefunden. Drücken Sie die Taste Kanalsuche **4** am Hörer so oft, bis Sie die Tonquelle gefunden haben.


## Verwendung von FM-Universalempfänger (Sennheiser 840-S) und SmartLink+, ZommLink+ oder EasyLink+ (Phonak)

1. Schliessen Sie das Audiokabel (3.5mm) mit dem einen Ende an den Universalempfänger an.
2. Schliessen Sie das Audiokabel (3.5mm) mit dem anderen Ende am Audioeingang Ihres SmartLink+, ZommLink+ oder EasyLink+ an.

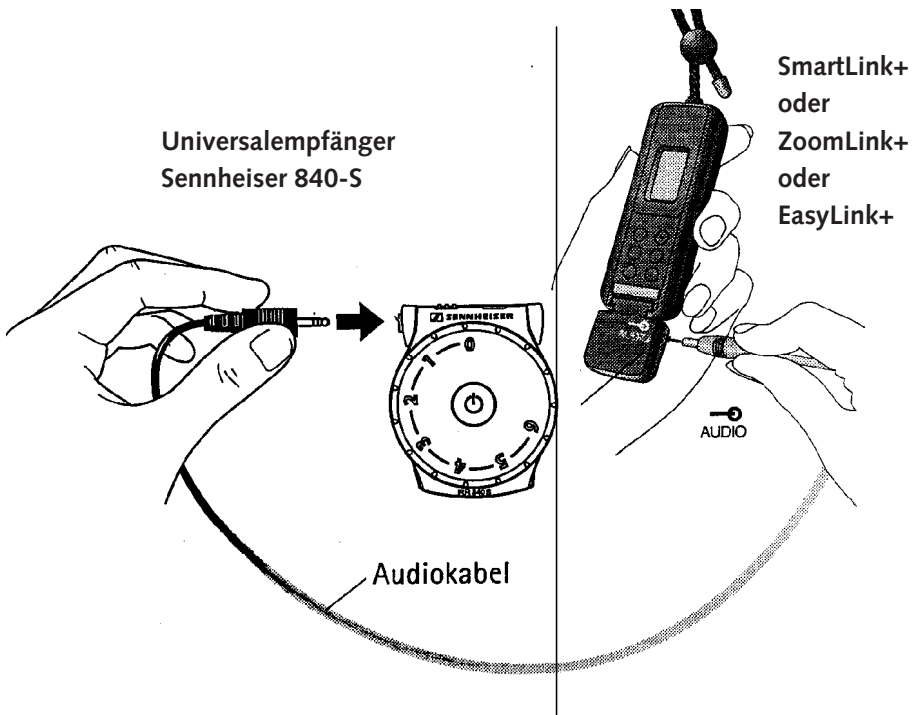

## Verwendung von FM-Universalaudioempfänger (Sennheiser 840-S) und iCom (Phonak)

1. Schliessen Sie das Audiokabel (3.5mm) mit dem einen Ende an den Universalempfänger an.
2. Schliessen Sie das Audiokabel (3.5mm) mit dem anderen Ende am Audioeingang Ihres iCom an.

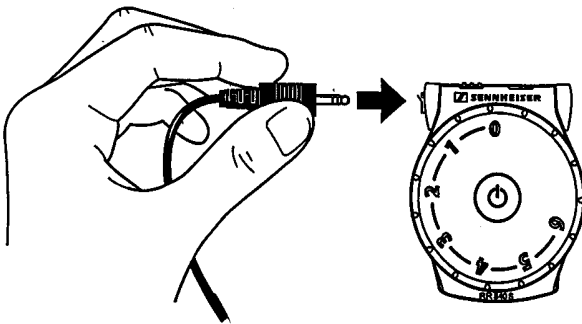

Universalempfänger  
Sennheiser 840-S

iCom Phonak



3,5 mm Buchse

## **Audiologische Hilfsmittel zur Verbindung des Hörsystems an den Universalempfänger**

### **Induktive Übertragung:**

Die Telefonempfangsspule muss im Hörsystem vorhanden und eingeschaltet sein!

- Induktionshalsschlaufe
- Induktionsplättchen
- Induktionshaken
- Induktionsbügelkopfhörer

### **Galvanische Übertragung:**

- Audioschuhadapter mit Zuleitungskabel
- Audio-Verlängerungskabel, Minijack positiv

### **Akustische Übertragung:**

- Walkmankopfhörer
- Bügelkopfhörer
- Knochenleitungskopfhörer

**Beratung und Verkauf der Hilfsmittel bei Ihrem Hörgeräteakustikfachgeschäft.**



# **Schwerhörigen-Verein** Nordwestschweiz

Hören heisst dazugehören.

Schwerhörigenverein Nordwestschweiz

Falknerstrasse 33, 4001 Basel

Tel: +41 61 261 22 24

Beratungsstelle für Höranlagen

Tel: +41 61 702 22 78